

**ORO ČIUŽINIO „BioFlote™ 4000“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**



**DĖMESIO!**

**Prieš naudodami čiužinį atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.**

**PASKIRTIS**

Šis produktas skirtas asmenims:

- kuriems reikia gydyti II laipsnio pragulas ir užkirsti joms kelią, kartu užtikrinant paciento komfortą;
- kuriems nuolat tenka būti namuose arba ligoninėje, ilgalaikiai priežiūrai ir pragulų gydymui;
- kuriems reikia gydyti ir mažinti skausmą, atsiradusį dėl spaudimo į minkštuosius kūno audinius, rekomenduojant gydytojui arba fizioterapeutui.

Šį gaminį gali naudoti asmenys, kurie turi kvalifikaciją atlikti bendrosios slaugos procedūras ir yra tinkamai apmokyti bei turi žinių apie pragulų prevenciją ir gydymą.

**SAUGUMO TAISYKLĖS**

Naudojant elektra maitinamus gaminius, ypač kai šalia yra vaikų, būtina laikytis visų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas.

**DĖMESIO!**

**Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų:**

1. Nenaudokite prietaiso maudydamiesi;
2. Po naudojimo prietaisą visada iškart išjunkite;
3. Nestatykite ir nelaikykite prietaiso ten, iš kur jis gali iškristi į vonią ar praustuvą arba būti į juos įstumtas;
4. Nekiškite ir nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį;
5. Nelieskite į vandenį įkritusio prietaiso. Tokiu atveju nedelsdami ištraukite prietaisą iš lizdo.

**ĮSPĖJIMAI!**

**Kad sumažintumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų pavojų:**

1. Įvertinkite tikimybę, kad prietaisas gali sudaryti kliūtį pacientui ir apriboti jo judesių laisvę arba visiškai jį suvaržyti. Jei yra tikimybė, kad taip gali atsitikti, pacientas turi būti nuolat stebimas.
2. Nenaudoti pacientams, kuriems pažeistas stuburas.
3. Svarbu prižiūrėti prietaiso veikimą, kai juo naudojasi vaikai arba kai jis naudojamas netoliese esant vaikams. Kai kurias smulkias detales galima lengvai išardyti, todėl vaikams kyla pavojus užspringti arba būti nutrenktiems elektros srovės.
4. Naudokite pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamais tikslais. Nenaudokite kitų nei gamintojo nurodytų čiužinių.
5. Nenaudokite įrenginio, jei jis veikia netinkamai, jei pažeistas laidas ar kištukas, jei jis buvo numestas, sugadintas ar įkrito į vandenį. Tokiu atveju įrenginį reikia nuvežti į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas ir (arba) suremontuotas.
6. Laikykite maitinimo laidą atokiau nuo karštų paviršių.
7. Neuždenkite oro įsiurbimo angos. Nedėkite ant minkšto paviršiaus (lovos, čiužinio, antklodės), kuris gali užblokuoti oro įsiurbimo angą. Aplink siurblių palaikykite švarą, kad nebūtų plaukų, pleiskanų, kirpimo atliekų ar kitų smulkių dalelių.
8. Nemodifikuokite ir neremontuokite įrenginio patys be gamintojo leidimo.
9. Jei įtariate, kad po kontakto su čiužiniu jums gali pasireikšti arba jau pasireiškė alergijos simptomai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
10. Apie bet kokią rimtą su prietaisu susijusį incidentą turi būti pranešta gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas arba pacientas, kompetentingai institucijai.

## 1. ĮVADAS

Naudojimo instrukcija reikia naudotis atliekant pirminį rinkinį surinkimą arba norint prisiminti informaciją apie teisingą čiužinio ir pompos naudojimą.

### BENDRA INFORMACIJA

Kintamo slėgio čiužinių nuo pragulų sistema turi labai pažangią technologiją, užtikrinančią aukščiausią prietaiso kokybę ir komfortą. Ji skirta pragulų prevencijai ir gydymui.

Sistema buvo išbandyta ir atitinka šiuos standartus:

EN 60601-1-11:2010, EN60601-1 : 2006, EN 60601-1-2: 2007, CISPR 11:2009, IEC 61000-4-3:2010, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004 IEC 61000-3-2:2009, IEC 61000-3-3:2008.

### EMC ĮSPĖJIMAS

Šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka medicinos prietaisams taikomus apribojimus pagal standartą EN 60601-12:2007. Šiais apribojimais siekiama užtikrinti tinkamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių tipiniame mediciniame įrenginyje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo bangas ir, jei jis nėra sumontuotas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali sukelti trukdžių kitiems šalia esantiems prietaisams. Vis dėlto nėra jokios garantijos, kad konkrečiame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia trukdžius kitai įrangai, kuriuos galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą, naudotojas gali bandyti ištaisyti trukdžius vienu ar keliais toliau nurodytais būdais:

- keisti priimančiojo įrenginio kryptį arba padėtį;
- padidinti atstumą tarp įrenginių;
- prijungti įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungta kita įranga;
- kreiptis pagalbos į gamintoją, tiekėją arba techninės priežiūros specialistą.



### DĖMESIO!

Prietaisas netinka naudoti šalia degių skysčių ir dujų.

## 2. GAMINIO KONSTRUKCIJA

### PNEUMATINIO SIURBLIO KONSTRUKCIJA

1. Greito atleidimo sujungimai
2. Priekinis valdymo skydelis;
3. Transportavimo jungtis;
4. Maitinimo kabelis;
5. Oro filtras;
6. Siurblio tvirtinimo įtaisai.

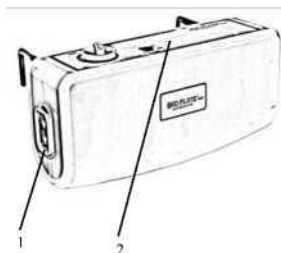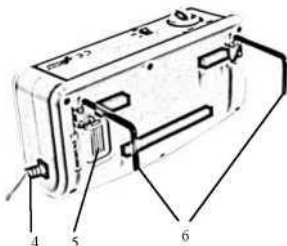

## PRIEKIS

1. Oro slėgio reguliatorius – oro slėgio vertės čiužinyje reguliatorius. Pasukdami rankenėlę į „MAX“ pusę, padidinsite slėgį, o pasukdami rankenėlę į „MIN“ pusę, sumažinsite slėgį čiužinyje;
2. Pagrindinis maitinimo jungiklis – skirtas įrenginio maitinimui įjungti ir išjungti.



## KOMPLEKTO SUDĖTIS

1. CPR vožtuvas;
2. Siurblys su slėgio valdymu;
3. Čiužinys su užvalkalu;
4. Greito atleidimo sujungimai
5. Transportavimo jungtis.

## 3. MONTAVIMAS

### IŠPAKAVIMAS

Siurblys ir čiužinys supakuoti į kartoninę dėžę, kad būtų apsaugotas viduje esantis turinys. Išpakuokite pakuotę ir patikrinkite, ar gabenant niekas nebuvo pažeista. Esant pažeidimams, nedelsdami kreipkitės į pardavėją.

### ĮRENGIMAS

1) Padėkite čiužinį ant lovos. Rekomenduojama čiužinį išdėstyti taip, kad čiužinio galas su įleidimo angomis būtų kojų pusėje. Įsitinkinkite, kad abiejose čiužinio pusėse esantys atvartai yra pakišti po lovos čiužiniu.

#### DĖMESIO!

Čiužinys turi būti užklotas paklode, kad oda nesiliestų su čiužiniu, taip padidinant paciento komfortą ir apsaugant čiužinį nuo sąlyčio su drėgme ar vaistais (kremais, tepalais).

2) Atlenkite kablukus ir pakabinkite siurblių ant lovos krašto arba pastatykite ant grindų tinkamoje vietoje, kad siurblys nebūtų pažeistas.

3) Prijunkite oro vamzdelius prie siurblio ir čiužinio. Būdingas spragtelėjimas parodys, kad laidai sujungti teisingai.

#### DĖMESIO!



Patikrinkite ir įsitinkinkite, kad oro vamzdeliai nėra susukti ar suspausti.

4) Prijunkite siurblių maitinimo laidu prie lizdo.

#### DĖMESIO!

Prieš įkišdami kištuką į lizdą įsitinkinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka prietaiso reikalavimus. Naudojant maitinimo kištuką, prietaisą taip pat galima atjungti. Elektros lizdas turi būti tokioje vietoje, kad būtų galima greitai atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio..

5) Įjunkite siurblio maitinimą (nustatykite jungiklį į ON padėtį).

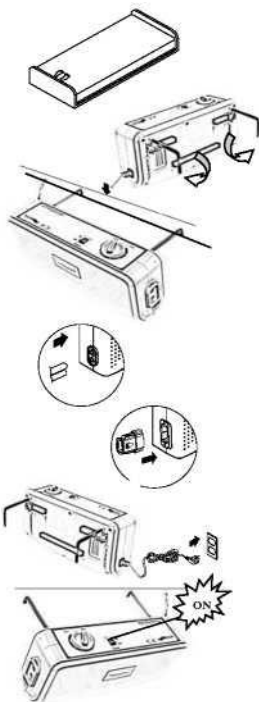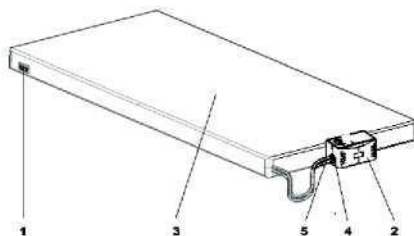

6) Prieš guldydami pacientą ant čiužinio palaukite maždaug 20 minučių, kol viena iš sekcijų visiškai išsipūs. Regulatoriaus rankenėlę nustatykite į maksimalią padėtį ir, kai čiužinys bus pripūstas, nustatykite pacientui tinkamą slėgį.

## **DĖMESIO!**

**Siurblių galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojamu čiužiniu. Nenaudokite siurblio kitiems tikslams. Svarbu prisiminti, kad siurblys turi veikti visą čiužinio naudojimo laiką. Išjungus siurblių, čiužinio naudoti negalima. Nepumpuokite čiužinio, kai ant jo guli pacientas.**


### **Keletas pastabų apie įrengimą:**

Po įrengimo įsitikinkite, kad maitinimo laidas guli taip, kad netrukdytų ir nesudarytų galimybes užkliūti ar nukristi. Įranga turi būti pastatyta taip, kad gydytojas arba naudotojas galėtų lengvai pasiekti prietaisą ir bet kada jį atjungti.

## **4. PRIEINAMOS FUNKCIJOS**

### ♦ CPR vožtuvas

Jei dėl kokių nors priežasčių reikia greitai išleisti orą iš čiužinio, patraukite CPR vožtuvo rankenėlę. CPR vožtuvas yra čiužinio krašte, galvos pusėje.

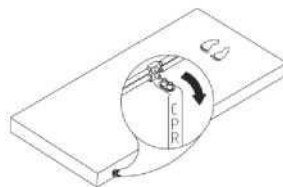


### ♦ Slėgio valdymas

Naudodamas slėgio reguliatorių naudotojas gali nustatyti norimą čiužinio minkštumą. Dėl čiužinio kietumo lygio nustatymo reikėtų pasitarti su savo šeimos gydytoju.

### ♦ Transportavimas

Norint išpūstą čiužinį perkelti, galima panaudoti greito atleidimo jungtį, kuri užblokuos oro nutekėjimą iš čiužinio transportuojant.

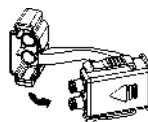

## **5. VALYMAS**

### **SIURBLYS**

Siurblių valykite drėgnu skudurėliu su švelniu plovikliu, laikykite toliau nuo dulkių. Negalima naudoti ploviklių, dėl kurių siurblio plastikinio korpuso paviršiuje gali kilti cheminė reakcija. Prieš pakartotinai naudodami, visas dalis kruopščiai išdžiovinkite.

## **DĖMESIO!**

**Prieš valydami įsitikinkite, kad siurblys yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Nėpanardinkite ir nesušlapinkite siurblio.**

### **ČIUŽINYS**

Čiužinį valykite šluoste arba kempine sudrėkinta šiltame vandenyje su švelniu plovikliu. Prieš pakartotinai naudodami, visas dalis kruopščiai išdžiovinkite.

## **DĖMESIO!**

Čiužiniui valyti nenaudokite tirpiklių ar alkoholio pagrindu pagamintų ploviklių. Dėl to gali būti pažeistas čiužinio paviršius – atsirasti įtrūkimų arba medžiaga gali sukietėti. Po valymo čiužinį džiovinkite pavėsyje.

## 6. SANDĖLIAVIMAS

1. Išpūstą čiuzinį padėkite ant lygaus paviršiaus.
2. Sukite čiuzinį nuo galvos iki kojų pusės, link oro išleidimo angos galų, esant atidarytam CPR vožtuvui.
3. Vamzdžius įkiškite į susukto čiuzinio vidų.

### DĖMESIO!

**Čiuzinio negalima lankstyti ar gniaužti. Venkite tiesioginio kontakto su saule.**

## 7. PERŽIŪRA

### BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Patikrinkite, ar nenusidėvėję maitinimo laidas ir kištukas.
2. Patikrinkite, ar čiuzinio paviršius nėra nusidėvėjęs, kietas arba pažeistas. Įsitikinkite, kad čiuzinio kameros teisingai sujungtos tarpusavyje, patikrinkite kamerų sandarumą.
3. Patikrinkite, ar nepažeistos ortakių jungtys ir patys ortakiai (susisukimai, įtrūkimai).
4. Patikrinkite, ar siurblys tinkamai veikia. Oro srautas tarp išėjimų turėtų keistis kas 1/2 ciklo.

### ORO FILTRO KEITIMAS

Oro filtrą reikia periodiškai tikrinti ir prireikus pakeisti (maždaug kas 12 mėnesių). Oro filtro užsiteršimas priklauso nuo aplinkos, kurioje veikia siurblys. Dėl nešvaraus (užsikimšusio) filtro siurblio viduje esantis kompresorius veiks netinkamai ir net gali būti sugadintas.

1. Atlaisvindami fikساتorių atidarykite oro filtro dangtį, esantį siurblio korpuso gale.
2. Patikrinkite oro filtrą ir, jei reikia, jį pakeiskite.
3. Uždėkite filtro dangtį.

## 8. NUMATOMAS GAMINIO TARNAVIMO LAIKAS

Garantiniu laikotarpiu saugus ir patikimas gaminio veikimas užtikrinamas, jei gaminys naudojamas ir prižiūrimas pagal gamintojo naudojimo instrukcijas. Gamintojas rekomenduoja, kad įgaliotasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas rinkinį tikrintų ir techninę priežiūrą atliktų tik tada, jei yra nusidėvėjimo požymių arba įtariama, kad įrenginys veikia netinkamai. Kitais atvejais prietaiso aptarnavimas ar tikrinimas paprastai nereikalingas.

## 9. GEDIMŲ ŠALINIMAS

### DĖMESIO!

Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nebandykite nuimti korpuso. Apie bet kokius remonto darbus reikia pranešti įgaliotajam techninės priežiūros centrui. Į komplektą įtrauktą remonto rinkinį galima naudoti pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Remontuodami čiuzinį ir nepranešę apie pažeidimą įgaliotam aptarnavimo centrui, iš karto neteksite teisės į garantiją.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nėra maitinimo	Patikrinkite, ar kištukas įkištas į lizdą, kuriame yra įtampa.
Užsidega žemo slėgio indikatorius lemputė	Patikrinkite, ar oro linijos prie siurblio ir čiuzinio prijungtos teisingai. Patikrinkite jungtis tarp kamerų. Patikrinkite sandarumą ties CPR vožtuvu. Jei siurblyje yra slėgio regulatorius, padidinkite slėgį. Patikrinkite, ar čiuzinio kameros nėra pradurtos ar įtrūkusios. <b>DĖMESIO:</b> Siurblys turi būti įjungtas visą naudojimosi čiuziniu laiką.
Siurblyje kartkartėmis girdimas triukšmas	Tai normalus reiškinys. Kai viena iš sekcijų ištušinama, per siurblių išleidžiamas oras, dėl to gali būti girdimas didesnis garsas.
Pacientas grimzta	Siurblio regulatoriumi nustatyta slėgio vertė netinka pacientui. Padidinkite slėgį ir palaukite, kol kameroje prisipildys oro.
Čiuzinys neišlaiko formos	Patikrinkite, ar kameros yra prilaikomos prie čiuzinio pagrindo pritvirtintais dirželiais, ar kameros yra pritvirtintos prie pagrindo fikساتoriais.

Dalis čiuzinio pumpuojant neišsipučia	Tai įprastas reiškinys, kai viena dalis yra pripūsta, o kita – ne. Praėjus pusei ciklo, sekcijos pumpavimas turėtų pasikeisti. Jei visą laiką pumpuojama tik viena iš sekcijų, tai gali reikšti, kad čiuzinys yra nesandarus arba sugedo siurblys.
---------------------------------------	--

Jei pirmiau pateikti patarimai nepadėjo pašalinti gedimo, kreipkitės tiesiogiai į vietinį atstovą. Tikėtina, kad jums reikės kreiptis į servisą.

### DĖMESIO!

**Rinkinyje yra atsarginė kamera. Jei čiuzinys nesandarus, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.**

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SARAŠAS	SIURBLIO SPECIFIKACIJOS
MODELIS	Oro čiuzinio „BioFlote™“ siurblys 4000
Maitinimas	230V/50Hz
Saugiklis	1A
Siurblio išmatavimai mm	28 x 15 x 9
Siurblio svoris	1.4 kg
Energijos suvartojimas	7W
Įėjimo galia	12 min
Slėgių diapazonas	40 mmHg – 100 mmHg
Siurblio našumas	8 l/min.

SARAŠAS	ČIUŽINIO SPECIFIKACIJOS
MODELIS	<b>BioFlote™ 4000</b>
Tipas	Su kameromis (17 oro kamerų)
Siurblio išmatavimai cm	190 x 88 x 11 – po napompowaniu
Čiuzinio svoris	4,85 kg
Didžiausias naudotojo svoris	140 kg
Medžiaga	Nailonas/polivinilchloridas
Spalva	mėlyna
Aplinkos temperatūra	Darbo: 5C~ 40C Saugojimo: -25°C~70°C Transportavimas: -25C~70C
Aplinkos santykinė drėgmė	Darbo: 15%~90% Saugojimo: 10%~90% Transportavimo: 10%~90%
Atmosferos slėgis	40 mmHg – 100 mmHg

### PASTABA

1. Pirmiau nurodyti techniniai parametrai galioja visuose objektuose su tokiais pačiais elektros energijos parametrais;
2. Norėdami gauti kitus techninius dokumentus, prašome kreiptis į savo tiekėją;
3. Gaminį utilizuokite laikydamiesi vietos teisės aktų reikalavimų.

### PRIEDĖLIS A : EMC INFORMACIJA

#### Gamintojo gairės ir deklaracija – elektromagnetinis spinduliavimas:

Šis prietaisas skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Šios įrangos naudotojas turi užtikrinti, kad ji būtų naudojama tokioje aplinkoje.

Išmetamųjų teršalų bandymas Suderinamum		Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos
RF CISPR 11 emisijos	1 grupė	Įrenginys naudoja RF energiją tik vidinėms funkcijoms atlikti. Todėl RF spinduliuotė yra labai maža ir negali sukelti jokių trukdžių šalia esantiems elektroniniams prietaisams.
RF CISPR 11 emisijos	B klasė	
IEC61000–3–2 harmoninės emisijos	A klasė	Šį įrenginį galima naudoti visose patalpose, įskaitant namų ūkio patalpas, ir jį galima prijungti prie bendro žemos įtampos elektros tinklo.
Įtampos svyravimai / vibracijų emisija IEC61000–3–3	Atitinka	

### Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas:

Šis prietaisas skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Šios įrangos naudotojas turi užtikrinti, kad ji būtų naudojama tokioje aplinkoje.

Atsparumo testas	IEC60601 Bandymo lygis	Suderinamumas	Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos
Elektrostatinis išlydis (ESD) IEC61000–4–2	±6 kV kontaktas ±8 kVoras	±6 kV kontaktas ±8 kVoras	Grindys turi būti medinės, betoninės arba keraminių plytelių. Jei grindys padengtos sintetine medžiaga, santykinė oro drėgmė turi būti ne mažesnė kaip 30 %
Greiti elektros nutrūkimai / IEC61000–4–4 serija	±2 kV maitinimo linijoje ±1 kV įvesties ir išvesties linijose.	±2 kV maitinimo linijose ±1 kV įvesties ir išvesties linijose.	Maitinimo šaltinio kokybė turi būti tipinė (ne kaip pramoninių patalpų ar ligoninių atveju)
Bangos IEC61000–4–5	±1 kV linijos – linijos ±2 kV linijos	±1 kV linijos – linijos	Maitinimo šaltinio kokybė turi būti tipinė (ne kaip pramoninių patalpų ar ligoninių)
Įtampos kritimai, trumpi pertrūkiai ir įtampos svyravimai maitinimo linijose IEC61000–4–11	<5% $U_T$ (>95% šuolis $U_T$ ) 0,5 ciklui 40% $U_T$ (60% šuolis $U_T$ ) 5 ciklams 70% $U_T$ (30% šuolis $w U_T$ ) 25 ciklams <5% $U_T$ (>95% šuolis $U_T$ ) 5 sekundėms		Maitinimo šaltinio kokybė turi būti tipinė (ne kaip pramoninėms patalpoms ar ligoninėms). Jei naudotojas nori, kad prietaisas veiktų nepertraukiamai ir nenutrūkstamai, jis turi turėti nuolatinį maitinimo šaltinį arba baterijas.
Maitinimo dažnio (50/60 Hz) magnetinis laukas IEC6100–4–8	3A/m	3A/m	Magnetinio lauko dažnio stiprumas turi atitikti netipinių vietų pramoninėje ar ligoninėje aplinkoje lygį.

PASTABA:  $U_T$  yra maitinimo įtampos vertė A.C. prieš bandymų atlikimą

### Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas:




Šis prietaisas skirtas naudoti toliau aprašytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Šios įrangos naudotojas turi užtikrinti, kad ji būtų naudojama tokioje aplinkoje.

Atsparumo testas	IEC60601 Bandymo lygis	Atitiktis	Elektromagnetinė aplinka – nurodymai
RF gairės IEC61000-4-6	3Vrms nuo 150 kHz iki 80 MHz už ISM <sup>a</sup> juostos ribų	3Vrms	<p>Nešiojamuosius ir mobiliuosius radijo dažnių įrenginius reikia naudoti ne arčiau bet kurios įrenginio dalies, įskaitant kabelius, nei rekomenduojamas atstumas, apskaičiuotas pagal siųstuvo dažnį atitinkančią lygtį.</p> <p>Rekomenduojamas atstumas:</p> $d = \left[ \frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P}$ nuo 150MHz iki 80MHz $d = \left[ \frac{3.5}{20} \right] \sqrt{P}$ nuo 80MHz iki 800 GHz $d = \left[ \frac{7}{20} \right] \sqrt{P}$ nuo 800MHz iki 2.5GHz
RF spinduliuotė IEC61000-4-3	3V/m 80MHz do 2.5GHz	3V/m	<p>kur <b>P</b> – didžiausia siųstuvo vardinė galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintoją, o <b>d</b> – rekomenduojamas atstumas metrais (m)<sup>b</sup> Stacionariųjų radijo dažnių siųstuvų lauko stipris, nustatytas pagal elektromagnetinį lauką vietoje<sup>c</sup>, turi būti mažesnis už atitikties lygį kiekviename svyravimų dažnyje<sup>d</sup>. Trukdžiai gali atsirasti netoli ŠIUO SIMBOLIŲ pažymėtų įrenginių:</p>



### SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Gamintojas:
	CE ženklėjimas
	Nuorodos numeris
	Pagaminimo data
	Peržiūrėkite naudojimo instrukciją
	Įspėjimas
	Serijos numeris
	Viršus, neapverskite
	Laikykite sausoje vietoje
	Elkitės atsargiai
	BF tipo dalys
	II apsaugos klasės įrenginys
<b>IP21</b>	Apsauga nuo kietų 12,5 mm ir didesnių objektų. Apsauga nuo vertikaliai krįtančių vandens lašų

	Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą (EB) ir Lenkijos įstatymą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šis ženklas rodo, kad pasibaigus įrangos naudojimo laikui ją reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo įmonę
	Nekirpti
	Perdirbimas



**REHA FUND Sp. z o.o.**

adresas: Staniewicka 14, 03–310 Varšuva, Lenkija  
tel. +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
el. pašto adresas: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.2

Paskelbta: 02/2021

### GARANTIJOS KORTELĖ ORO ČIUŽINYS BIOFLOTE™ 4000

Modelis:	Serijos numeris:	Pardavimo data:	Pardavėjo parašas ir antspaudas:

### GARANTIJOS SĄLYGOS

- Gamintojas užtikrina klientą, kad pardavimo prekė, kuriai išduota ši garantijos kortelė, yra visiškai nauja ir kokybiška.
- Čiužiniui ir siurbliui suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pardavimo datos, nurodytos garantinėje kortelėje.
- Skundo nagrinėjimo pagrindas yra švaraus, sukomplektuoto gaminio pristatymas su teisingai užpildyta garantine kortele ir pirkimo įrodymu (čekiu, PVM sąskaita faktūra). Nepateikus dokumentų arba pristačius užterštą produktą, pretenzijos nagrinėjimas bus sustabdytas arba atnestas.
- Skundai nagrinėjami nedelsiant, kai tik įmanoma, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo į servisą. Jei remontui reikalingos dalys importuojamos iš užsienio, šis laikotarpis gali būti pratęstas ir apie tai bus pranešta skundo pateikėjui.
- Galimus įrangos defektus taiso REHA FUND Sp. z o.o. arba įgalioti serviso specialistai, jei čiužinys ir siurblys buvo naudojami pagal paskirtį ir laikantis naudojimo instrukcijų.
- Servisas turi teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą, jei garantinė kortelė yra neįskaitoma arba bet kokie duomenys yra pakeisti ar papildyti.
- Garantija netaikoma:
  - gaminio priežiūrai, valymui, naudojimui, laikymui ir reguliavimui, kaip aprašyta naudojimo instrukcijose;
  - įprasto naudojimo metu susidėvėjusioms dalims;
  - mechaniniams ir terminiams pažeidimams, pvz., įbrėžimams, įpjovimams ir pan.;

- žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo ne pagal naudojimo instrukcijas, aplaidumo, neleistino remonto, pakeitimų, modifikacijų ir struktūrinių pakeitimų, taip pat dėl atsitiktinių įvykių atsiradusiai žalai.
8. Prieš atiduodami įrangą įgaliotiems techninės priežiūros specialistams, turite ją išvalyti pagal naudojimo instrukcijas, kad ji būtų tinkama techninei priežiūrai.
  9. Remontą ir atsarginių dalių keitimą turi atlikti įgalioti „Reha Fund Ltd“ techninės priežiūros specialistai.
  10. Jei paraiška nepagrįsta (gaminys veikia) arba jei dėl žalos kaltas naudotojas, visas su skundo nagrinėjimu susijusias išlaidas, pvz., siuntimo išlaidas, padengia skundo pateikėjas.
  11. Atlikus bet kokius remonto ar modifikavimo darbus ir apie tai nepranešus įgaliotajam techninės priežiūros centrui, iš karto prarandamos garantinės teisės.
  12. Teritorinė garantijos apsaugos taikymo sritis apima Lenkijos Respublikos teritoriją.
  13. Parduodamų prekių garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo kliento teisių, atsirandančių dėl prekės neatitikimo sutarčiai.

SERVISO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS (turi užpildyti servisas)

Eil. Nr.	Pateikimo data	Užsakymo Nr.	Defekto aprašymas ir (arba) remonto apimtis	Remonto data	Serviso antspaudas ir parašas
1					

**PASTABO**