

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
TUALETO KĖDUTĖ LUISO 840**

„MEDICINOS GAMINYS“

Katalogo Nr.	RF-840/N	RF-840/CZA
Apmušaų spalva	mėlyna	juoda
Rėmo spalva	pilkas	pilkas
Didžiausia saugi apkrova	130 kg	130 kg
Svoris	8 kg	8 kg
Bendras plotis	56 cm	56 cm
Bendras aukštis	80-95 cm	80-95 cm
Gylis	52-57 cm	52-57 cm
Sėdynės plotis	43 cm	43 cm
Sėdynės gylis	42 cm	42 cm
Sėdynės aukštis	40-55 cm	40-55 cm
Tualetu angos dydis	24 x 21 cm	24 x 21 cm


DĖMESIO! Prieš naudodami kėdutę atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

PASKIRTIS

Tualetu kėdute veikia kaip nešiojamasis tualetas. Kėdute galima naudoti prie paciento lovos. Padeda žmonėms, turintiems judėjimo negalią (nuolatine ar periodine), ir pagyvenusiems žmonėms atlikti pagrindinius fiziologinius veiksmus. Kėdute taip pat galima naudoti kaip tualetu prailgintuvą ir kaip įprastą sėdimąją kėdę. Kėdute palengvina pacientų priežiūrą. Dėl turėklų lengviau pakilti nuo kėdutės ir ant jos atsėsti. Skirta riboto judrumo, bet pakankamai sėdimų vietų turintiems naudotojams. Kėdute naudinga šiais atvejais: pacientams, kurių liemens kontrolė ribota, žmonėms, turintiems pusiausvyros sutrikimų, galvos svaigimą, žmonėms, kurių apatinių galūnių funkcija sutrikusi, labai apribotas juosmeninės stuburo dalies, klubo ir kelio sąnario judrumas, paralyžius.


SAUGOS TAISYKLĖS

Saugumo sumetimais reikėtų laikytis šių rekomendacijų:

- Prieš naudodami tualetu kėdute įsitikinkite, kad:
 - tinkamai sureguliuotas kėdutės aukštis;
 - užrakinimo mygtukai veikia tinkamai;
 - guminiai dangteliai yra geros būklės;
 - visos kėdutės kojelės yra viename aukštyje.
- Naudokite tik originalius priedus. Naudojant neoriginalias dalis, kėdute gali netinkamai prisitaikyti, todėl gali kilti pavojus nukristi.
- Neviršykite didžiausios leistinos kėdutės apkrovos.
- Nelaikykite kėdutės žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
- Apie bet kokią rimtą su įrenginiu susijusį incidentą reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena naudotojas arba pacientas, kompetentingai institucijai.
- Kėdutės negalima naudoti, jei turite suvokimo sutrikimų arba didelį pusiausvyros sutrikimą.
- Apvartimo pavojus padidėja, kai pakraunama didelė vienas pusė apkrova.
- Draudžiama lipti ant kėdutės – gresia paslydimo pavojus.


DĖMESIO! Nesilaikant pirmiau nurodytų saugos taisyklių, gali įvykti rimtų nelaimingų atsitikimų.

KĖDUTĖS KONSTRUKCIJA

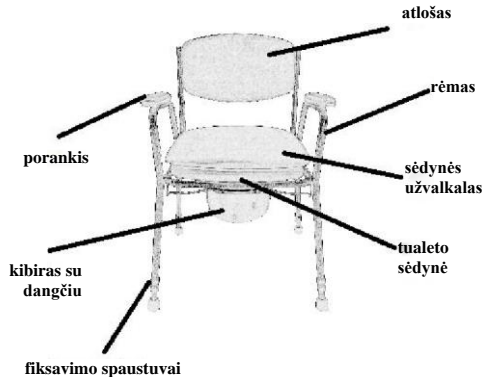

KIBIRO IŠĖMIMAS IR ĮDĖJIMAS

Norėdami išimti kibirą, išstumkite jį iš kėdutės šone esančių kreipiančiųjų (2 pav.) arba nuimkite viršų pakreipdami tualetų sėdynę (1 pav.). Norėdami įstatyti kibirą, užmaukite jį ant šliaužiklių (2 pav.) arba įstatykite jį pakreipdami klozeto sėdynę į viršų (1 pav.).

AUKŠČIO REGULIAVIMAS:

1. Nuimkite fiksavimo spaustuvą – suimkite ją nykščiu ir rodomuoju pirštu, tada ištraukite jį išorę (4 pav.).
2. Norėdami pasiekti norimą aukštį, pastumkite pagrindą žemyn arba aukštyn (3 pav.).
3. Įstumkite fiksavimo spaustuvą atgal į atitinkamą angą.
4. Įsitinkinkite, kad fiksavimo spaustuvas teisingai užfiksavo nurodytą kojelės padėtį.

1 pav.	2 pav.
3 pav.	4 pav.

SĖSDAMAS IR KĖLIMASIS

1. Įsitinkinkite, kad kėdė tvirtai stovi ir yra paruošta naudoti.
2. Atsistokite nugarą į kėdę taip, kad galine kelių dalimi paliestumėte kėdės priekį.
3. Ištieskite rankas atgal ir padėkite delnus ant turėklų.
4. Lėtai atsisėskite ant kėdės, sulenkdami alkūnes ir, jei įmanoma, kelius bei klubus.
5. Norėdami pakilti nuo kėdutės, rankomis atsiremkite į turėklus ir pakilkite. Prieš paleisdami kėdutės turėklus įsitinkinkite, kad išlaikote pusiausvyrą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Patartina reguliariai tikrinti, ar kėdutė nėra pažeista arba nėra matomų nusidėvėjimo požymių. Reguliariai tikrinkite ar:
 - ant rėmo nėra jokių įtrūkimų ar lūžių;
 - apatiniai dangteliai nėra susidėvėję – jei taip, juos reikia pakeisti;
 - jokios kitos kėdutės dalys nėra atsilaisvinusios ar pažeistos.
2. Po kiekvieno naudojimo kėdutę rekomenduojama valyti minkšta šluoste ir muiluotu vandeniu. Po valymo kėdutę reikia nusausinti minkšta šluoste. Kibirą galima dezinfekuoti šaltuoju būdu, pavyzdžiui, etanoliu.



DĖMESIO! Valydami kėdutę nenaudokite tirpiklių, baliklių ar abrazyvinių medžiagų.

PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

atlošas	mediena + putplastis + PVC (polivinilchloridas)
rėmas	plienas, dažytas miltelinu būdu
sėdynės užvalkalas	mediena + putplastis + PVC (polivinilchloridas)
fiksavimo spaustuvai	PA6 (poliamidas)
kibiras	PP (polipropilenas)
dangtelis	PP (polipropilenas)
porankis	PVC (polivinilchloridas)
dangteliai	TPE (termoplastinis elastomeras)

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

	Gamintojas
	CE ženklavimas
	Referencinis numeris
	Pagaminimo data
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Išpėjimas
	Serijos numeris
	Viršuje, neapversti
	Laikyti sausoje vietoje.
	Trapus, elgtis atsargiai



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03 – 310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, faks.: +48 22 594 03 07
e.paš.: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



ver. 1.3
Leidiny: 03/2021

**GARANTINIS RAŠTAS
TUALETO KĖDUTĖ LUISO 840**

Modelis:	Serijos numeris:	Pardavimo data:	Pardavėjo parašas ir antspaudas:

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Gamintojas užtikrina klientą, kad pardavimo prekė, kuriai išduotas šis garantinis raštas, yra visiškai nauja ir kokybiška.
2. Kėdei taikoma 12 mėnesių garantija nuo pardavimo datos, nurodytos garantiniame rašte.
3. Garantinės pretenzijos nagrinėjimo pagrindas yra teisingai užpildyto garantinio rašto pateikimas kartu su pridėtu pirkimo įrodymu.
4. Galimus defektus taiso „REHA FUND Sp. z o.o.“ arba įgalioti techninės priežiūros specialistai, jei kėdė buvo naudojama pagal paskirtį ir naudojimo instrukcijas.
5. Remontas bus atliktas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įrangos gavimo serviso centre dienos.
6. Garantija netaikoma:
 - kėdutės priežiūrai, valymui ir reguliavimui pagal naudojimo instrukciją;
 - dalims, susidėvintiems įprasto naudojimo metu;
 - mechaniniams ir terminiams kėdutės pažeidimams, pvz., įlenkimams, įbrėžimams, lūžiams ir pan.
 - Žalai, atsiradusiai dėl įrangos naudojimo nesilaikant naudojimo instrukcijų, aplaidumo, savadarbio remonto, modifikacijų ar konstrukcijos pakeitimų
7. Prieš atiduodami įrangą įgaliotiems techninės priežiūros specialistams, turite ją išvalyti pagal naudojimo instrukcijas, kad ji būtų tinkama techninei priežiūrai.
8. Remontą ir atsarginių dalių keitimą turi atlikti įgalioti „Reha Fund Sp. z o.o.“ techninės priežiūros specialistai.
9. Nepagrįstos pretenzijos atveju iš kliento bus pareikalauta padengti siuntimo išlaidas.
10. Garantijos apsauga apima Lietuvos Respublikos teritoriją.
11. Parduotų prekių garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo kliento teisių, kylančių iš prekės neatitikimo sutarties sąlygoms.

REMONTO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRE SĄRAŠAS (pildo techninės priežiūros centras)

Eil. Nr.	Paraiškos data	Užsakymo Nr.	Defekto aprašymas / Remonto apimtis	Taisymo atlikimo data	Techninės priežiūros įstaigos antspaudas ir parašas
1.					
2.					